


Włączanie i wyłączanie aparatu

Aby włączyć aparat należy powoli obrócić pokrętkę regulacji wzmocnienia, w którym znajduje się również wyłącznik. Przekręcamy aż do momentu uzyskania wymaganego poziomu dźwięku.

Aby wyłączyć aparat obracamy pokrętkę w przeciwną stronę aż do momentu usłyszenia lub wyczucia charakterystycznego „klik”.

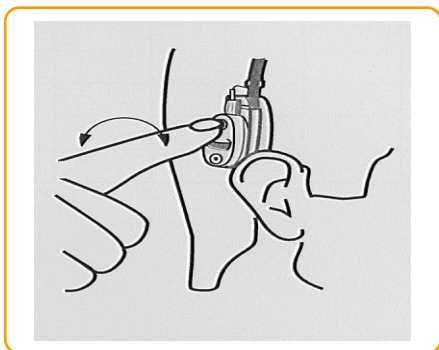

Pielęgnacja aparatu

Gdy aparat nie jest używany przez dłuższy czas należy usunąć baterię z przedziału pojemnika.

Aparat przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Nie należy dopuszczać by woda, lub inne ciecze dostały się do wnętrza aparatu słuchowego.

Nie należy narażać aparatu na działanie wysokich temperatur.

Unikać upuszczania aparatu słuchowego.

Delikatne wycieranie aparatu miękką szmatką i czyszczenie otworu mikrofonu miękką szczoteczką zapewni jego bezawaryjną pracę.

Starkey

Laboratories Poland sp. z o.o.

ul. Wirażowa 119


02-145

Warszawa

www.starkey.com.pl

e-mail:starkey@starkey.com.pl

CE 0086

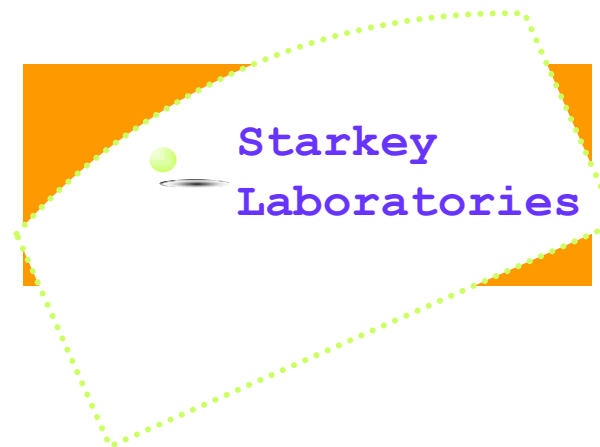

Instrukcja aparatu słuchowego


BC1 STARKEY



„Słuch jest naszą troską”

Aparat BC 1 Starkey

Identyfikacja

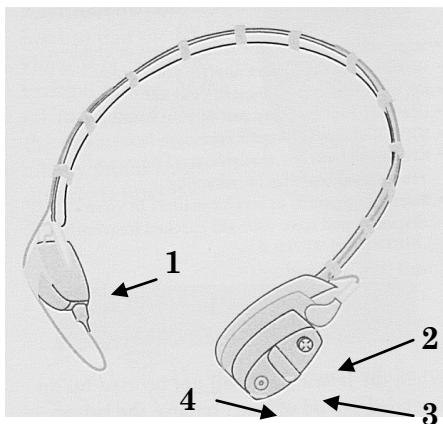


1. Wibrator kostny
2. Potencjometr siły głosu
3. Komora baterii
4. Mikrofon

Przeznaczony dla osób z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu.
Zasilany baterią rozmiar 675.
Dostępny w wersji z regulowaną długością opaski.

Wymiana baterii

Aby wymienić baterię należy wyjąć przedział pojemnika baterii podkładając paznokciem pod krawędź pokrywy i delikatnie pociągając ją na zewnątrz. Usunąć baterię wypychając ją z dna pokrywy. Umieścić nową baterię w przedziale tak aby znak (+) pokrywał się ze znakiem (+) na przedziale pojemnika. Zamknąć przedział pojemnika baterii przez wciśnięcie pokrywy.

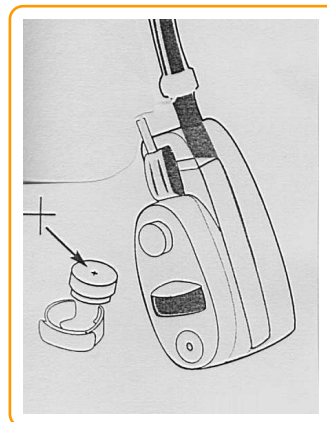

**NIE NALEŻY DRZWICZEK
KOMORY BATERII OTWIERAĆ
LUB ZAMYKAĆ SIŁĄ.**

Jeżeli drzwiczki komory baterii nie zamykają się, należy sprawdzić, czy bateria umieszczona jest prawidłowo w komorze. Najczęstsze kłopoty wynikają z pomyłkowego wkładania baterii odwrotną stroną!

Jeżeli drzwiczki baterii się nie zamykają, należy skonsultować się ze specjalistą w punkcie sprzedaży aparatów słuchowych.

POŁKNĘCIE BATERII STWARZA POWAŻNE ZAGROŻENIE !!!

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Niekiedy baterie mylone są z tabletkami, zwłaszcza przez osoby starsze lub niedowidzące. Należy, więc zawsze sprawdzać wszelkie leki przed połknięciem.

Nie należy nigdy wkładać baterii do ust, ponieważ można je łatwo połknąć.

Po usunięciu zużytych baterii należy natychmiast wrzucić je w specjalne miejsce przeznaczone na odpady. Ze względu na ochronę środowiska baterii nie należy wrzucać do śmieci. Każdy punkt sprzedaży aparatów słuchowych prowadzi zbiórkę takich baterii.